

Informace pro použití

Popis výrobku

HydroTac je pěnové krytí na rány s krycí polyuretanovou fólií, která je propustná pro plyny, ale nepropustná pro tekutiny a choroboplodné zárodky. Pěnové krytí má na té straně, kterou se přikládá na ránu, vrstvu hydrogelu. Tento gel se skládá z vodnatého hybridního polymeru polymočovina/polyuretan, který obsahuje propylenglykol.

HydroTac comfort má navíc po celém obvodu samolepící okraj s vrstvou polyakrylátového lepidla.

Vlastnosti a způsob použití

HydroTac* vstřebává sekrety z rán a zároveň v podmínkách suchého prostředí v ráně vlhkost vydává. Tím v každém případě vznikne vlhké prostředí, které pozitivně stimuluje proces hojení rány. Gelová vrstva, kterou se krytí přikládá na ránu zabraňuje slepení krytí s ránou. Obvaz je možné z rány bezbolestně a beze zbytku odstranit.

HydroTac comfort má po celém obvodu samolepící okraj, není tedy nutné zapotřebí dalšího materiálu k fixaci.

Indikace

HydroTac je určený pro ošetřování ran se slabou až střední sekrecí v granulační a epitelizační fázi.

Způsob použití

HydroTac, HydroTac comfort vyberte podle velikosti rány tak, aby krytí přesahovalo o 1 – 2 cm přes okraj rány. V případě potřeby je možné HydroTac přistříhnout sterilními nůžkami.

HydroTac: Stáhněte průhlednou ochrannou fólii podle obrázků (1 & 2) a přiložte krytí gelovou vrstvou na ránu. Krytí samo lehce přilne, čímž je manipulace s ním snadnější. Nezávisle na tom musí být ale krytí v každém případě zafixováno vhodným fixačním materiálem (např. samolepící náplastí Omnifix elastic, nebo fixačním obinadlem Peha-haft).

HydroTac comfort: Stáhněte průhlednou ochrannou fólii podle obrázků (1 & 2) a přiložte krytí gelovou stranou na ránu a lepicí okraj dobře přitlačte. Potom odstraňte krycí fólii podle obrázků (3 & 4).

V každém případě musí být zajištěn přímý kontakt s ránou. Pro ošetřování hlubokých a rozštěpených ran by se měly použít jiné vhodné výrobky (např. Hydrosorb Gel nebo Sorbalgon).

Výměnu obvazu je třeba provést tehdy, je-li to klinicky indikované, anebo je-li na okrajích obvazu vidět sekret.

Kontraindikace

HydroTac by neměl být použit při precitlivosti na některou z obsažených látek.

Zvláštní preventivní opatření

Před každým ošetřením špatně hojitelných ran je nutné vyjádření lékaře o stavu rány a důvodu její špatné hojitelnosti. Ošetření rány krytím HydroTac nemůže nahradit kauzální léčbu poruch hojení rány.

HydroTac by se měl u klinicky infikovaných ran a v oblasti obnažených kostí a šlach použít pouze pod lékařským dohledem.

U popálenin 2b a 3 stupně může být HydroTac použit po provedené nekro-sektomii resp. po ošetření.

HydroTac nepoužívejte současně s oxidačními látkami jako hypochloridovými roztoky nebo peroxidem vodíku, protože by pěnové krytí mohlo být poškozeno.





Zvláštní upozornění

- Skladujte v suchu a při teplotách nižších než 40 °C.
- Obsah je sterilní, pokud není poškozen peel-obal.
- Opakovaně nesterilizovat.
- Chraňte před dětmi.

* Pokud je v následujícím textu uveden název HydroTac, vztahuje se tento název na všechna provedení; všechny odchylovající se výjimky jsou výslovně uvedené.

Datum revize textu: 2009-12

HydroTac comfort

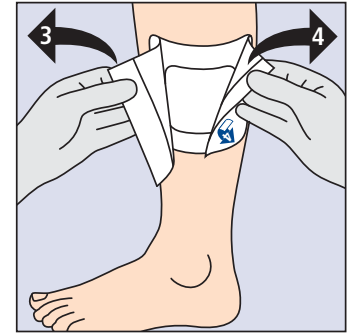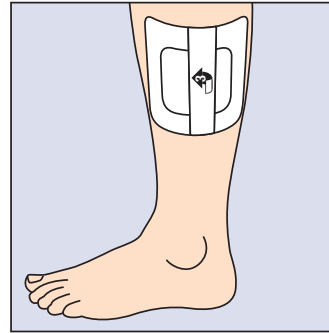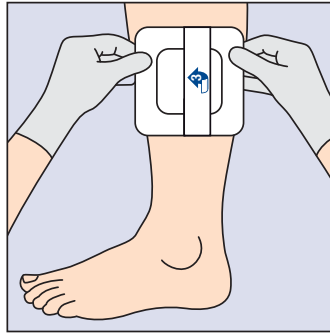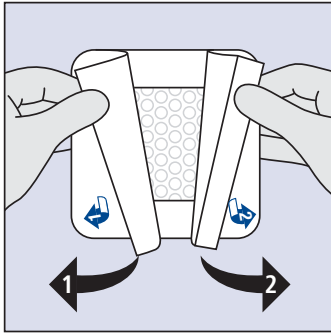

HydroTac

